

### Anvendelse



Fold rundt



Juster højden



Spænd

### Kontroller pasform

#### 1 Er brystbenets øverste kant fri?

Kraven bør sidde ved eller under hulningen i brystbenets øverste kant.

#### 2 Sidder kraven tæt?

Kraven må ikke sidde løst. Spænd stropperne ensartet, så kraven sidder til, og efterspænd, så for- og bagpanelerne overlapper hinanden. DynaCapture-bagpanelet skal støtte bagsiden af patientens hoved.

#### 3 Er siderne fri af skuldrene?

Rotér siden på frontpanelet væk fra patientens skuldre.



### Kontroller pasform

#### 1 Er "hageprikkerne" dækket?

Hagestykket af plastic skal gå helt ud til kanten af hagen, så denne dækker prikmarkeringerne på hagestykket.

#### 2 Er mærket dækket af stroppen?

Kraven må ikke sidde løst. Spænd stropperne ensartet, så kraven sidder til, og efterspænd stropperne, til hver af dem dækker det grønne mærke, så kraven sidder sikkert og for- og bagpanelerne overlapper hinanden.

#### 3 Er FlexTabs™ bøjet?

Hvis kraven har den rette størrelse og er spændt korrekt, fjedrer FlexTabs™ og fordeler trykket på støttefladen

OBS: Den inderste strubeplade må aldrig røre luftvejene.



Det kan være nødvendigt at supplere med et ekstra underlag under barnets overkrop for at sikre en neutral kropstilling. Der henvises til hospitalsprotokol

## PD Støttekrave