

Vejledning til Walker-bandage.



Find den størrelse der passer til patienten: XS: <35 / S:36-39 / M:40-42 / L:43-45 /XL: >45.

OBS: Hvis anklen er hævet eller hvis der er risiko for at anklen vil hæve op efterfølgende, er det vigtigt at vælge en størrelse der er bred nok!!!!

Fjern Velcro straps fra bandagen og tag polsteret ud af bandagen.

Placer foden i polsteret og luk denne tæt omkring fod/ankel/underben. Sørg for at polsteret nu sidder tæt til fod/ankel/underben.

Spred de to metal stænger fra hinanden (det er vigtigt at plastikken stadig sidder på de to stænger) og sæt foden i bandagen. Hælen skal placeres helt tilbage til hælkapten.

Placer de to metal stænger således af de flugter med midtlinjen af underbenet, og fjern nu plastikken således at metal stængerne fikseres til polsteret.

Spænd Velcro båndene, start fra tærne og forsæt opad.

Hvis patienten skal have kile i Walkeren, skal denne placeres inde i polsteret!!